



Sekusept® Cleaner

ZUR VORREINIGUNG MEDIZINISCHER INSTRUMENTE

- ▲ Starke Reinigungsleistung
- ▲ Gute Materialverträglichkeit
- ▲ RKI-konforme, nicht fixierende Vorreinigung




Sekusept® Cleaner

FLÜSSIGREINIGER FÜR MEDIZINISCHES INSTRUMENTARIUM

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Gute Materialverträglichkeit	Für die schonende, manuelle Vorreinigung von med. Instrumenten, thermolabilem Zubehör und flexiblen Endoskopen. Auch geeignet für Atemschutzzubehör nach DMT. Geeignet zur Verwendung in Ultraschallbädern.
Reinigungsstarke Tensidkombination	Reduziert selbst hartnäckige organische Verschmutzungen wie z. B. angetrocknetes Blut und Eiweiß
Gute Kompatibilität	Sekusept® Cleaner kann als Reinigungsverstärker den Instrumentendesinfektionsmitteln Sekusept® Forte, Sekusept® Forte S und Sekusept® Extra N zugesetzt werden. Der Reinigungsverstärker beeinträchtigt nicht die mikrobiologische Wirksamkeit von Sekusept® Forte, Sekusept® Forte S und Sekusept® Extra N (Prüfung erfolgte unter praxisnahen Bedingungen gem. DGHM Methode 1991).
Anwenderfreundliche Rezeptur	Angenehmer Geruch, leichte Blaufärbung sorgt für gute Erkennbarkeit der Instrumente in der Lösung, niedrige Einsatzkonzentration

Chemisch-physikalische Daten		
Dichte	20 °C	1,04 g/cm ³
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 12
pH-Wert* (1-2 %-ige Lösung)	20 °C	ca. 9-10

*pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

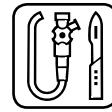

Reinigung von Medizinprodukten



ANWENDUNGSHINWEISE

1%, bei stärkerer Verschmutzung maximal 2%. Wird Sekusept® Cleaner als Reinigungsverstärker verwendet, erst Desinfektionslösung ansetzen, dann Sekusept® Cleaner zugeben.

Hinweis: Desinfektions- und Reinigungsmittellösungen nicht mit heißem Wasser ansetzen.

Bitte beachten Sie die Angaben der Instrumentenhersteller. Nur für den professionellen Gebrauch.

DOSIERUNG

	1 %	2 %
1 Liter	10 ml	20 ml
10 Liter	100 ml	200 ml

Anwendungsbeispiel 10 Liter:

1%ige Anwendungslösung = 100 ml Sekusept® Cleaner + 9,9 Liter Wasser

ZUSAMMENSETZUNG

Nichtionisches Tensid, Lösungsmittel, Komplexbildner, alkalischer Hilfsstoff, Parfum, Farbstoff.

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Sekusept® Cleaner 30 310 50
Griffflasche 4 x 2 L

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Regional Office
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0) 2173-599-0
www.ecolabhealthcare.de

