

Wofasept® FL-Sprühdesinfektion

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel

- Anwendung:** Für die geruchsneutrale Desinfektion von abwaschbaren Oberflächen im Arbeitsbereich von Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen sowie Laboren, Lebensmittel- und Gastronomiebereichen sowie zur Bekämpfung von Pilzen auf rohem Holz.
- Eigenschaften:** Wirksam gegen Bakterien, Pilze, lipophile Viren (einschließlich HBV / HIV) und humane Rotaviren.
Chlor-, aldehyd- und phenolfrei.
Auch anwendbar wenn eine alkoholische Desinfektion unerwünscht ist.
Materialverträglichkeit geprüft: Ruft keine Spannungsrissskorrosion an Acrylglas hervor.
Basiert auf dem Präparat Wofasept FL-Konzentrat, das gemäß den Richtlinien des VAH und der DVG geprüft und zertifiziert ist.
- Zusammensetzung:** Wofasept FL-Sprühdesinfektion enthält:
0,75 % quartäre Ammoniumverbindungen in wässriger Lösung.
- Aussehen:** Klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit.
- Anwendungshinweise:** Unverdünnt aufsprühen, ggf. nach der Einwirkzeit mit einem trockenen Tuch nachwischen.

	Einwirkzeit
Zur Flächendesinfektion in Krankenhaus, Praxis sowie anderen medizinischen Einrichtungen auch bei hoher Eiweißbelastung • gegen Hepatitis B und C und HIV • gegen Herpesviren	1 min 15 min
Für die Desinfektion von Solarien und abwaschbaren Oberflächen	1 min
Für den Lebensmittelbereich	30 min
Für die Bekämpfung von Pilzen auf rohem Holz	60 min

- Materialverträglichkeit:** Vor dem Einsatz des Produktes empfehlen wir die Prüfung der Materialverträglichkeit. An einer unauffälligen Stelle wird das Produkt in der entsprechenden Konzentration aufgetragen.
- Wechselwirkungen:** Kombinierte Anwendung von Wofasept FL-Sprühdesinfektion mit anderen Desinfektions- oder Reinigungsmitteln unterlassen, da diese die Wirkung durch chemische Interaktion aufheben können.
Nach dem Einsatz von anionischen Reinigungsmitteln ist vor der Desinfektion eine gründliche Spülung mit Wasser zu empfehlen.
- Sicherheitshinweise:** Nicht in die Augen sprühen. Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Kinderspielzeug nach der Desinfektion mit Wasser abspülen.

Lagerung: Bei Raumtemperatur in Originalgebinden und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Haltbarkeit: 5 Jahre

Packungsgrößen:		PZN	Liefereinheit
500 ml - Sprühflasche		6878235	Karton mit 10 Flaschen
5 l - Kanister		6878229	Karton mit 3 Kanistern

Zubehör (optional): Entnahme- und Dosierpumpe, Auslaufhahn für 5 l-Kanister

UBA 25341004

**Biozid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
N-22126 (Produktart 2), N-22127 (Produktart 4)**

FLS 03.10