

# DESCOCEPT AF WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher mit frischem Duft
- umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren
- gute Hautverträglichkeit



CE 0482

## PRÄPARATETYP

**DESCOCEPT AF WIPES** sind gebrauchsfertige, aldehydfreie Desinfektionstücher auf der Basis von Ethanol und QAV.

**DESCOCEPT AF WIPES** haben einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT AF WIPES** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren, auch wirksam gegen Noro-Viren.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, in denen eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie OP-Schuhe, Gummischürzen

**DESCOCEPT AF WIPES** erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit bezüglich der Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen gem. TRGS 525/406.

## ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven alkoholbeständigen Medizinprodukten.

**Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

## ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT AF WIPES** vollständig abwischen bzw. ausreichend benetzen.

## WIRKUNGSSPEKTRUM

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-Viren, Noro-Viren)

## EINWIRKZEIT

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** wirkt:

<b>bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH</b>	konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)	
Tuberkulose-Bakterien ( <i>M.terrae</i> )	konz. 1 Min.
<i>Aspergillus niger</i>	konz. 30 min.

<b>wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vaccinia-, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-/Grippe-Viren</b>	
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	konz. 30 Sek.
Rota-/Adeno-Viren	konz. 1 Min.
Noro-Viren (MNV)	konz. 5 Min.

## EINWIRKZEITEN GEM. EUROPÄISCHER NORMEN EN

Belastung	EN 1040 Bakteri- zidie	EN 1276 Bakteri- zidie	EN 1650 Levuro- zidie	EN 13697 Bakteri- zidie	EN 13697 Levuro- zidie	EN 14476 Noro-Virus
niedrig	1 min.	1 min.	1 min.	1 min.	1 min.	5 min



# **DESCOCEPT AF WIPES**

## alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

### ZUSAMMENSETZUNG

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** enthält in 100 g:  
42,0 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Inhalt: 1 Dose/Nachfüllbeutel enthält 120 Tücher á 14 x 20 cm.

### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

(Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF**)

**Aussehen des Konzentrates:** klare, farblose Lösung  
**pH-Wert:** 7,0 +/- 1,0  
**Dichte (20,0 °C):** 0,930 +/- 0,002

### LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Spenderdose mit 120 Tüchern	12 x 1 Dose	1898486	00-312-D120
Nachfüllbeutel mit 120 Tüchern	12 x 1 Beutel	1898581	00-312-R120

### BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten! Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen!

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### GUTACHTEN

Gutachten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF**:

**Dr. Pitten**, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.

**Dr. Suchomel**, Hygienikerin, Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.

**Prof. Dr. Werner**, Hygieniker, Schwerin:

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit.

Gutachten zur Wirksamkeit gegen Noro-Viren (MNV) gem. EN 14476.

Gutachten zur Wirksamkeit gem. EN 1040, EN 1276, EN 1650 und EN 13697.

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-Viren, Vaccinia-Viren.

**Dr. Brill**, Biologe, Hamburg:

Gutachten zur Wirksamkeit gegen *Aspergillus niger*.

**Dermatest**, Münster:

Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest).

**Konrad Hornschuch AG**:

Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESCOCEPT AF** zur Anwendung an skai- Polstermaterialien.

### PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH und der ÖGHMP.

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** ist gelistet in der aktuellen IHO-Viruzidie-Liste ([www.iho-viruzidie-liste.de](http://www.iho-viruzidie-liste.de)).

**DESCOCEPT AF WIPES** ist registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 39455.

**DESCOCEPT AF WIPES** entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte.

### UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

